

PARI *chamber*

ANTISTATIC

Crește împreună cu tine

Indiferent de vârstă, acasă sau pe drum, PARIchamber este aparatul VHC pentru toți pacienții dumneavoastră

Caracteristici principale

- Compartiment antistatic cu ventil (valved holding chamber - VHC) pentru dozarea fiabilă a aerosolilor
- Piesă pentru gură transparentă pentru verificare vizuală, cu ventil de expirare cu rezistență redus
- Adaptor MDI universal
- Poate fi dezinfectat în apă clocotită sau aparat de dezinfectare cu aburi
- Măști *SmartTouch*® adaptabile pentru orice utilizare



www.pari.de

0 – 2 ani cu mască bebe „buburuză” Art. nr. 035G2020	Peste 2 ani cu mască pentru copii „broscuță” Art. nr. 035G2040	Peste 4 ani fără mască Art. nr. 035G1000
		


Specialists in effective inhalation



Cum se utilizează **PARI** *chamber* ?


Brosuța Felix îi arată și îi explică buburuzei Maria

1

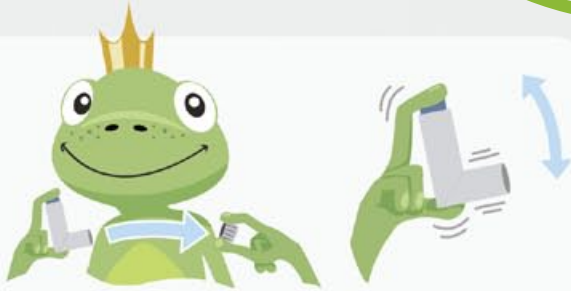


Mai întâi scoate capacul sprayului numit inhalator cu dozare (MDI).
Maria nu uită să scuture sprayul înainte de folosire.

2

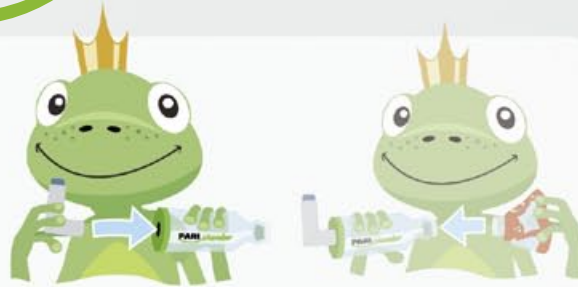


Apoi introduci sprayul în inelul de racordare verde de pe PARIchamber. Dacă utilizezi o mască, monteaz-o pe piesa pentru gură.

3a

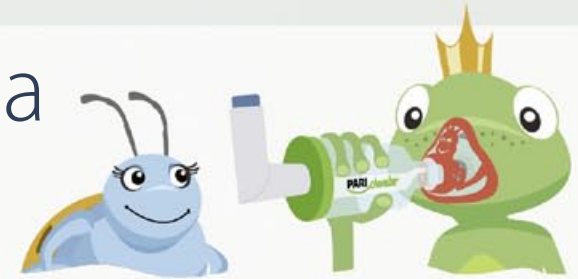

Pune-ți masca pe față și ai grijă ca masca să-ți atingă fața în jurul nasului și gurii.

3b

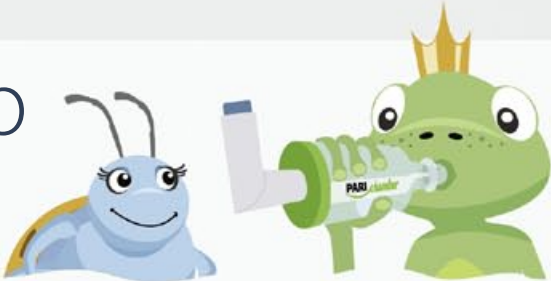

Maria, când vei fi mai mare, nu vei mai avea nevoie de mască, fiindcă vei ști să folosești piesa pentru gură. Atunci va trebui să ai grijă să prinzi piesa pentru gură a PARIchamber între dinți și să-ți închizi buzele în jurul ei.

4



Acum, Maria, poți să apeși pe spray o dată cu degetul. Ai grijă să inspiri lent și adânc

5



Dacă doctorul ți-a prescris două sau mai multe doze la o utilizare, va trebui să repeți pașii 3 și 4.

Nu uita!

Dacă ești mai mică de 18 luni, trebuie să inspiri de 4-6 ori. Dacă ești mai mare de 18 luni, trebuie să inspiri de 2-4 ori.

După ce ai terminat, PARIchamber trebuie curățat.

1

Demontează inelul de racordare și masca, dacă există.



Curățare:

2

Curăță toate piesele delicat, dar temeinic cu apă caldă de la robinet și un pic de detergent de spălat vase. Clătește bine toate piesele cu apă proaspătă, curată.



Dezinfectare:

3

PARIchamber, inclusiv masca, pot fi dezinfectate într-un aparat de dezinfectare cu aburi.



4

Ca alternativă, așează toate piesele în apă clocotită pentru cel puțin 5 min. Ai grijă ca PARIchamber să fie complet acoperit de apă.



Uscare:

5

Lasă aparatul PARIchamber să se usuce la temperatura camerei sau usucă-l cu un ștergar curat.



6

Depozitează PARIchamber într-un loc sigur, uscat și fără praf.

